

# SPECI-GARD®



## sac de transport pour prélèvements biologiques

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION



1. Mettre l'échantillon dans la plus longue poche du sachet.



2. Retirer la languette bleue pour exposer la partie adhésive.



3. Pour fermer, tirer fermement de chaque côté.



4. Insérer la demande d'examen dans la poche extérieure et sous le rabat pour une totale sécurité.



5. Pour ouvrir, tirer au niveau de la découpe.



#### LESS FRANCE

18, rue de Derrière la Montagne

Z.I. La Tuilerie

77500 CHELLES

tél. 01 64 26 79 40

fax. 01 64 26 38 10

e-mail : [less.france@lessfrance.com](mailto:less.france@lessfrance.com)

site web : [www.lessfrance.com](http://www.lessfrance.com)